

Drift och skötselinstruktion SRAB Diskbänksavskiljare

Innehåll:

Rengöring och skötsel av amalgamavskiljaren, sid 1

Instruktion för byte av amalgamavskiljaren, sid 2

Monteringsanvisning, sid 3

Rengöring och skötsel av amalgamavskiljaren

Dagligen

Rengör och desinfektera amalgamavskiljaren dagligen efter arbetsdagens slut. För desinfektion skall Recyclean R användas som spädes och används enligt anvisningarna på förpackningen. Utebliven desinfektion, eller desinfektion med ineffektivt medel, ger bakterietillväxt i amalgamavskiljaren som försämrar amalgamavskiljningen och kan orsaka stopp.

Recyclean R tillverkas av Sweden Recycling AB och kan beställas direkt från oss eller någon av våra återförsäljare.

Det är viktigt att ej använda andra medel som innehåller syror eller starka komplexbildare, då dessa kan lösa ut kvicksilver och därigenom försämma avskiljningen.

Veckovis

Kontrollera en gång i veckan att inget läckage förekommer från amalgamavskiljaren eller utjämningskärlet.

Årligen

Amalgamavskiljaren skall bytas minst en gång om året. Detta sköts i regel av Sweden Recycling:s miljöservicepersonal. Vid akuta byten och i vissa distrikt som ej körs av våra miljöservicebilar, byts avskiljaren av klinikens egen personal och sänds till Sweden Recycling med postens företagspaket (se instruktion för detta på nästa sida).

Utjämningskärlet bör öppnas och rengöras en gång om året. Miljöservicepersonalen från Sweden Recycling kan utföra denna rengöring i samband med avskiljarbytet mot en extra avgift.

Observera! För att amalgamavskiljaren skall fungera tillfredsställande och för att garanti och produktansvar skall gälla måste avskiljaren tömmas och regenereras hos Sweden Recycling AB.



Instruktion för byte av amalgamavskiljaren

Amalgamavskiljaren skickas till tandkliniken i ett frigolitemballage som även används som returemballage för den fulla avskiljaren efter bytet.


- Lossa vinklarna från den gamla avskiljarens anslutningar genom att samtidigt vrida och lyfta. OBS lossa inte slangen från vinkeln.
- Ta bort locken från den nya avskiljarens anslutningar också genom att vrida och lyfta.
- Anslut vinklarna till den nya avskiljarens anslutningar.
- Kontrollera att in och utlopp inte förväxlats.
- Sätt på locken på den gamla avskiljaren genom att trycka och vrida. Stoppa den i samma frigolitemballage som den nya avskiljaren levererades i .
- Försegla emballaget noga med tejp och skicka det till Sweden Recycling AB med Postens Företagspaket. Använd returadresslappen som bifogades vid leveransen av den nya avskiljaren.

Telefonnummer för bokning av hämtning av Postens Företagspaket är 0771-33 33 10.

Returfrakten ingår i avgiften för byte av avskiljaren under förutsättning att den returneras inom 14 dagar.

Monteringsanvisning

- Montera bort vattenlåset från vasken där amalgamavskiljaren skall anslutas. Vattenlåset behövs inte eftersom amalgamavskiljare SRAB 99 fungerar som ett vattenlås. Anslut utjämningskärlet mot vaskens utloppskrage. Säkra utjämningskärlet med den medlevererade konsolen.
- Anslut utjämningskärlets utlopp till avskiljarens inlopp med den medföljande slangen och vinkeln. Inloppet är markerat på avskiljarens etikett. Vinklarna fästes vid slangarna med medföljande slangklämmor. Slangen kapas till rätt längd så att inga skarpa böjar bildas på den.
- Avluftning från utjämningskärlet fästes under diskbänksplåten med självhäftande clips.
- Slangen för överfyllnadsskydd anslutes mellan utjämningskärlet och avloppet.
- Anslut avskiljarens utlopp till avloppet med den medföljande slangen och vinkeln markerad med "UT". Utloppet är markerat på avskiljarens etikett. Vid dubbelvask ansluts till avloppet efter det kvarvarande vattenlåset så lågt som möjligt.
- Täta golvavloppet mot utloppsslangen för att undvika kloaklukt.

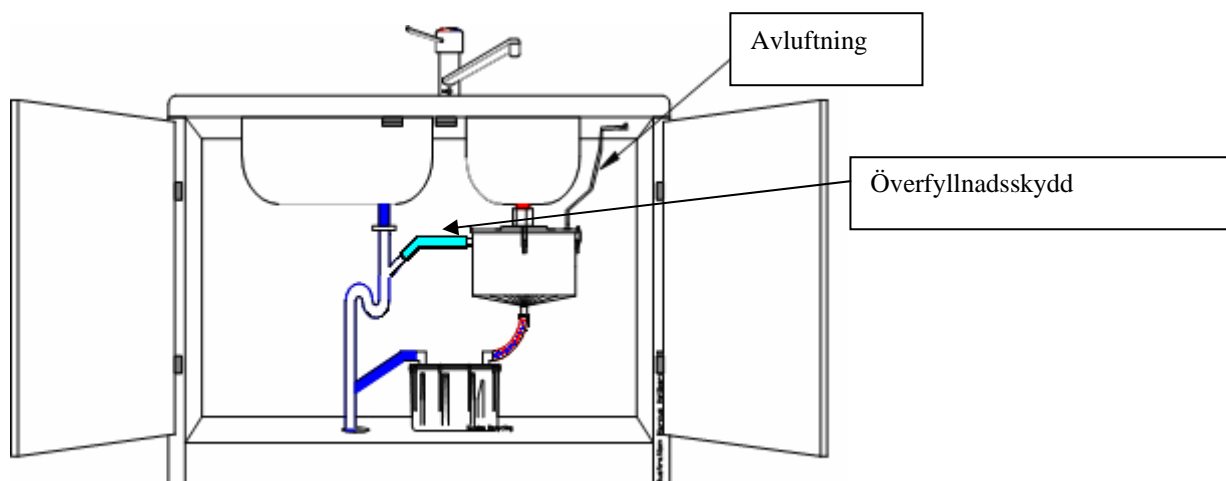

Avskiljaren skall monteras/placeras vågrätt. För kraftiga böjar på slangarna kan orsaka driftsstörningar. Diskbänksavskiljaren bör endast anslutas till en av disklådorna. Notera att en av vinklarna är märkta med "UT" och är försedd med en strypbricka. Denna vinkel skall monteras på avskiljarens utlopp. Överfyllnadsskyddet skyddar mot översvämning om det skulle bli stopp i amalgamavskiljaren. Om detta inträffar måste amalgamavskiljaren bytas snarast.

OBS! Avlopp från DISKDESINFEKTOR får ej anslutas till amalgamavskiljare.

Omhändertagande av vattenlås

Vattenlås som monteras bort måste omhändertas som farligt avfall då det kan innehålla kvicksilver. Placera vattenlåset i den medföljande plastpåsen. Vattenlåset lämnas tillsammans med övrigt farligt avfall till godkänd transportör.