

BÄST I TEST!*

RECYCLEAN R



DESINFEKTIONSMEDEL



ORIGINALET



The Sweden Recycling AB organization is certified under SS-EN ISO 9001, 13485 and 14001

September 2007



SWEDEN RECYCLING

Järnvägsgatan 19 • 360 51 Hövmantorp • SWEDEN
Tel. +46 478 475 00 • Fax. +46 478 475 01
www.swedenrecycling.se



RECYCLEAN R

Desinfektionsmedel för aktiv rengöring och desinfektion av dentala sugsystem.

Användning

RECYCLEAN R är ett högeffektivt desinfektionsmedel avsett för daglig desinfektion och rengöring av dentala sugsystem, fontäner och amalgamavskiljare. RECYCLEAN R kan användas till alla typer av amalgamavskiljare och sugsystem.

Blanda en brukslösning av 50 ml RECYCLEAN R med 2,5 liter vatten (1:50). Använd bifogad mått enhet för uppmätning. Rengör och desinficera fontänen med en ½ liter av brukslösningen och sug på normalt sätt upp resterande 2 liter genom sugslangarna. Avsluta genom att suga upp ytterligare 2 liter rent vatten genom sugslangarna.

RECYCLEAN R rekommenderas speciellt när sugsystemet belastas frekvent med mycket organiskt material från tex. operationer. RECYCLEAN R rekommenderas också vid stora sugsystem med långa sugledningarna och stora vattenflöden. RECYCLEAN R är effektivt mot bakterier, mycobakterier samt jäst- och mögelsvampar.

Observera


Daglig desinfektion skall ske för att öka sugsystemets driftsäkerhet och så att amalgamavskiljningen ska fungera korrekt. RECYCLEAN R ska lagras svalt och mörkt. Får ej blandas med syra. Hållbarhet 1 år från tillv. dat.




Säkerhetsdatablad hämtas på www.swedenrecycling.se eller beställs från Sweden Recycling AB, tel 0478-475 00

RECYCLEAN R levereras i en kartong med 6 st 1,5-litersflaskor


Effekt våta system*

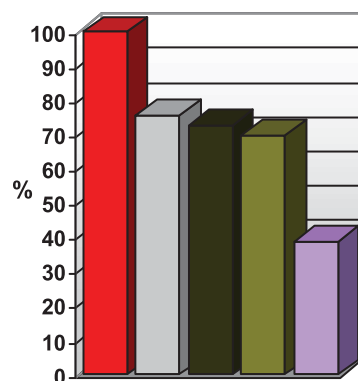

Pris per desinfektion*

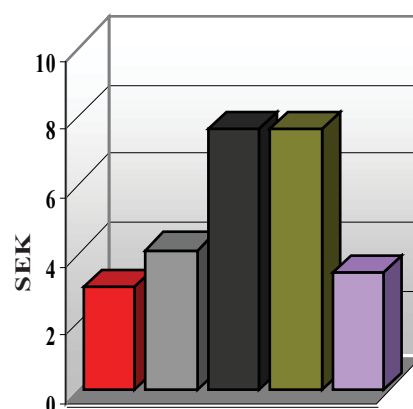

Bakteriehalt efter desinfektion i våta system*

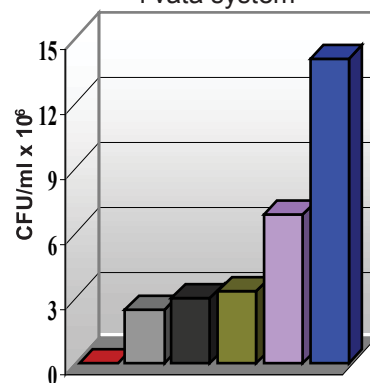

*De mest använda desinfektionsmedlen i Skandinavien har jämförts med Recyclean R. Tester har utförts i laboratorium i SRAB's regi av fil. Dr. Johanna Granberg, f d Stockholms Universitet

RECYCLEAN R



SWEDEN RECYCLING

Järnvägsgatan 19 • 360 51 Hovmantorp • SWEDEN
Tel. +46 478 475 00 • Fax. +46 478 475 01
www.swedenrecycling.se

