

INSTALLATIONSANVISNING

Enkel Pumpbox ansluten till SRAB Flex system



SRAB ENKEL PUMPBOX



Funktion

Pumpboxen innehåller dräneringspump för kontinuerlig tömning av dentala sugsystem i vakuum. Integrerade nivågivare aktiveras av hög vattennivå och dräneringspumpen pumpar ut ca 1 liter under 5 sekunder vid varje tömning mot backventilen.

Teknisk data

Spänning: 230 V AC/13,2 DC
Kapacitet vid vakuumsug: 12 l/min
Strömstyrka : 4,5 amp

Montage


1. Anslut föravskiljaren till sekretkärlet vid märkning "IN".
2. Placera amalgamavskiljaren bredvid föravskiljaren.
3. Anslut amalgamavskiljarens märkning "IN" till föravskiljaren vid märkning "UT".
4. Placera Pumpboxen parallellt med amalgamavskiljaren.
5. Anslut amalgamavskiljaren vid märkning "UT" med rörvinkeln märkt "Ut/out", till pumpboxen vid märkning "IN". Använd förgrening med vakuumslang för anslutning.
6. Koppla vakuumslangen till centrumuttaget på sekretavskiljartanken.
7. Anslut backventil vid pumpboxens märkning "UT".
8. Anslut backventilens utlopp till avloppsnätet.
9. Koppla strömförsörjningen till pumpboxen och anslut till 230V vägguttag.

Kontrollera att kopplingarna är ordentligt täta mot inläckage av luft. Vid inläckage påverkas separationsfunktionen negativt.

Byte

Pumpboxen ingår i Sweden Recycling AB:s bytessystem, vilket innebär att pumpboxen årsvis ska kontrolleras för service och funktion vid Sweden Recyclings fabrik. Kontrollen är en förutsättning för angiven livslängd.

Byte sker genom att Flexsystemet slås av. Koppla sedan bort strömförsörjningen till pumpboxen, flytta över snabbkopplingarna till den nya pumpboxen och anslut därefter strömförsörjningen.

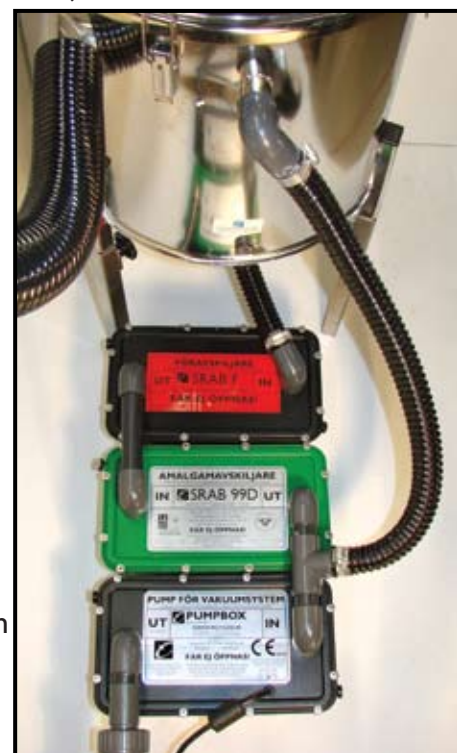

Sweden Recycling's organisation är certifierad enligt SS-EN ISO 9001, 13485 och 14001

Juni 2008



SWEDEN RECYCLING

Järnvägsgatan 19 • 360 51 Hövmantorp • SWEDEN
Tel. +46 478 475 00 • Fax. +46 478 475 01
www.swedenrecycling.se