



**SWEDEN  
RECYCLING**

The Experts in Dental Services

**Stark mot biofilm och bakterier i uniten**

## RECYCLEAN B Engångsrengöring

RECYCLEAN B Engångsrengöring är ett speciellt desinfektions- och rengöringsmedel för engångsrengöring av vattensystem i dentala unitar. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla tandvårdskliniker låta analysera unitvattnet en gång per år. En mikrobiologisk analys ger en bild av klinikens hygieniska och hälsomässiga status med ledning av provets innehåll av mikroorganismer. Om resultatet visar en onaturligt hög halt av mikroorganismer kan RECYCLEAN B Engångsrengöring vara lösningen.

RECYCLEAN B Engångsrengöring rekommenderas vid höga halter bakterier och betydande mängd biofilm i vattensystemet.

RECYCLEAN B Engångsrengöring är inte avsedd för periodisk rengöring och får endast användas av dentaltekniker.

### Produktfördelar med RECYCLEAN B Engångsrengöring

- ✓ Högeffektiv mot både bakterier och biofilm i unitens vattensystem
- ✓ Rekommenderas för engångsspolning vid hög belastning med mikroorganismer i unitens vattensystem
- ✓ Lämplig för alla tillverkare och modeller av unitar

# Fakta om RECYCLEAN B Engångsrengöring


## Användning

För att RECYCLEAN B Engångsrengöring ska kunna användas behöver uniten vara utrustad med ett system för rengöring av vattensystemet eller ha ett separat vattensystem som kan användas för säker dosering.

1. Fyll vattensystemets doseringsflaska med RECYCLEAN B Engångsrengöring.
2. Sätt flaskan i rengöringssystemet.
3. Sätt bläster och borrar i hållaren för rengöring.
4. Fyll unitens vattensystem och slangarna till trevägssprutan.
5. Låt desinfektionsmedlet verka i **högst 5 minuter**.
6. Skölj rikligt med vatten tills den blåa färgen har försvunnit.



Exempel från testunit efter rengöring med RECYCLEAN B ENGÅNGSRENGÖRING

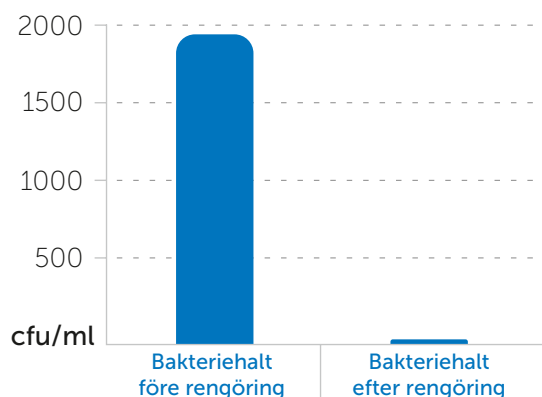

## Viktigt att veta

Om vattensystemet innehåller en stor mängd biofilm kan detta orsaka problem vid rengöring med RECYCLEAN B Engångsrengöring. Biofilmen kan lossna och leda till stopp i borrar och trevägssprutan. Om det uppstår ett sådant stopp behöver slangarna rensas genom renblåsning med tryckluft. Därför rekommenderar Sweden Recycling att RECYCLEAN B Engångsrengöring endast används av en dental servicetekniker eller att rengöringen utförs under uppsyn av en servicetekniker.

**RECYCLEAN B ENGÅNGSRENGÖRING levereras i en kartong med 6 stycken 0,5-litersflaskor.**