


MONTERINGSANVISNING

SRAB DISKBÄNKSAVSKILJARE

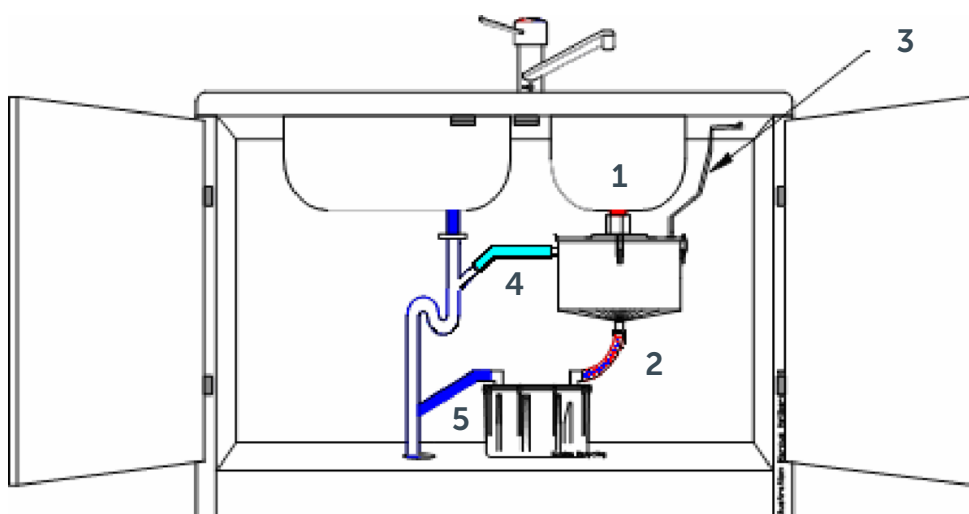

1. Montera bort vattenlåset från vasken där amalgamavskiljaren skall anslutas. Vattenlåset behövs inte eftersom amalgamavskiljare SRAB 99 fungerar som ett vattenlås. Anslut utjämningskärlet mot vaskens utloppskrage. **Säkra utjämningskärlet mot läckage med den medlevererade vinkelkonsolen.**
2. Anslut utjämningskärlets utlopp till avskiljarens inlopp med den medföljande slangen och vinkeln. Inloppet är markerat på avskiljarens etikett. Vinklarna fästes vid slangarna med medföljande slangklämmor. Slangen kapas till rätt längd så att inga skarpa böjar bildas på den.
3. Avluftning från utjämningskärlet fästes under diskbänksplåten med självhäftande clips.
4. Slangen för överflynnadsskydd ansluts mellan utjämningskärlet och avloppet.
5. Anslut avskiljarens utlopp till avloppet med den medföljande slangen och vinkeln markerad med "UT". Utloppet är markerat på avskiljarens etikett. Vid dubbelvask ansluts till avloppet efter det kvarvarande vattenlåset så lågt som möjligt.
6. Täta golvavloppet mot utloppsslangen för att undvika kloaklukt.
7. Montera den medföljande etiketten på väggen ovanför den vask som försetts med amalgamavskiljare.
8. Avskiljaren skall monteras/placeras vågrätt. För kraftiga böjar på slangarna kan orsaka driftstörningar. Diskbänksavskiljaren bör endast anslutas till en av diskåldorna. Överflynnadsskyddet skyddar mot översvämning om det skulle bli stopp i amalgamavskiljaren. Om detta inträffar måste amalgamavskiljaren bytas snarast. **Kopplingarna till amalgamavskiljaren får inte limmas fast**, då den behöver bytas en gång om året.

OBS! Avlopp från DISKDESINFEKTOR får ej anslutas till amalgamavskiljare. Sweden Recycling rekommenderar att alltid använda ett läckageskydd.

Omhändertagande av vattenlås

Vattenlås som monteras bort måste omhändertas som farligt avfall då det kan innehålla kvicksilver. Placera vattenlåset i den medföljande plastpåsen. Vattenlåset lämnas tillsammans med övrigt farligt avfall till godkänd transportör.