



**SWEDEN
RECYCLING**

The Experts in Dental Services

DRIFT- & SKÖTSELINSTRUKTION AMALGAMAVSKILJARE

Daglig drift

Rengör och desinfektera amalgamavskiljaren dagligen efter arbetsdagens slut. Vi rekommenderar att använda Recyclean R för desinfektionen, som spädes och används enligt anvisningarna på förpackningen. Utebliven desinfektion eller desinfektion med ineffektivt medel ger bakterietillväxt i amalgamavskiljaren som försämrar amalgamavskiljningen och kan orsaka stopp.

Recyclean R tillverkas av Sweden Recycling AB och kan beställas från någon av våra återförsäljare.

Det är viktigt att ej använda andra medel som innehåller syror eller starka komplexbildare, då dessa kan lösa ut kvicksilver och därigenom försämrav avskiljningen.

Daglig kontroll

I samband med daglig desinfektionsrutin kontrollera att det läcker inget vatten från amalgamavskiljarens IN / UT anslutningar.

Årlig drift

Amalgamavskiljaren skall bytas minst en gång om året. Detta sköts i regel av våra servicetekniker. Vid akuta byten och i vissa distrikt som ej körs av våra miljöservicebilar, byts avskiljaren av klinikens egen personal och sänds till Sweden Recycling.

OBS! För att amalgamavskiljaren skall fungera tillfredsställande och för att garanti och produktansvar skall gälla måste avskiljaren tömmas och regenereras hos Sweden Recycling AB.

