

DRIFT- & SKÖTSELINSTRUKTION SRAB DISKBÄNKSAVSKILJARE

Daglig drift

Rengör och desinfektera amalgamavskiljaren dagligen efter arbetsdagens slut. Vi rekommenderar att använda Recyclean R för desinfektionen, som spädes och används enligt anvisningarna på förpackningen. Utebliven desinfektion eller desinfektion med ineffektivt medel ger bakterietillväxt i amalgamavskiljaren som försämrar amalgamavskiljningen och kan orsaka stopp.

Recyclean R tillverkas av Sweden Recycling AB och kan beställas från någon av våra återförsäljare.

Det är viktigt att ej använda andra medel som innehåller syror eller starka komplexbildare, då dessa kan lösa ut kvicksilver och därigenom försämrar avskiljningen.

Daglig kontroll

I samband med daglig desinfektionsrutin kontrollera att läckage ej förekommer. Kontrollera: Anslutningar IN / UT på amalgamavskiljare
Anslutning mellan avskiljare och utjämningskärl

Årlig drift

Amalgamavskiljaren skall bytas minst en gång om året. Detta sköts i regel av våra servicetekniker. Vid akuta byten och i vissa distrikt som ej körs av våra miljöservicebilar, byts avskiljaren av klinikkens egen personal och sänds till Sweden Recycling.

Utjämningskärlet bör öppnas och rengöras en gång om året. Våra servicetekniker kan utföra denna rengöring i samband med avskiljarbytet mot en extra avgift.

OBS! För att amalgamavskiljaren skall fungera tillfredsställande och för att garanti och produktansvar skall gälla måste avskiljaren tömmas och regenereras hos Sweden Recycling AB.

